



Betreff: Kompatibilität der ThermoScan® PRO 6000 Sondenhüllen mit anderen Geräten der Braun PRO Serie, Welch Allyn Artikelnummer 06000-800

Die ThermoScan Sondenhüllen der PRO 6000 Serie wurden passgenau für die Verwendung mit dem ThermoScan PRO 6000 Ohrthermometer entwickelt. Das PRO 6000 Thermometer ist mit einem roten Pin ausgestattet und die darauf abgestimmten Sondenhüllen sind so konstruiert, daß sie noch sicherer auf die Sondenspitze passen.

Die PRO 6000 Sondenhüllen können auch mit anderen Modellen der PRO Serie verwendet werden (PRO 4000 und PRO 3000). Sie bieten auch bei Anwendung mit diesen Geräten die gleiche Genauigkeit, Patientensicherheit und denselben Benutzerkomfort. Allerdings muss die korrekte Ladetechnik angewandt werden, um die Sondenhüllen sicher anzubringen und den einwandfreien Betrieb zu gewährleisten. Fehlerhaftes Laden führt dazu, dass das Zeichen "Es ist keine Sondenhülle angebracht" aufleuchtet und das Thermometer die Temperaturmessung nicht durchführen kann.

Eine Anleitung zur "Korrekten Anbringung der Sondenhüllen" steht zur Verfügung, um Anwender zu schulen. Ein Muster dieser Anleitung finden Sie auf der Rückseite dieses Dokuments.

PRO 4000 Sondenhüllen	PRO 6000 Sondenhüllen
<p>Die PRO 4000 Sondenhüllen sind geeignet für das PRO 4000 (& PRO 3000). Sie sind nicht passend für das PRO 6000 Gerät.</p>	<p>Die PRO 6000 Sondenhüllen wurden speziell für das PRO 6000 Thermometer entwickelt. Sie können auch mit dem PRO 4000/3000 Gerät verwendet werden, wenn man mit besonderer Sorgfalt die korrekte Ladetechnik befolgt.</p>
<div style="text-align: center;">  <p>Pro 4000 bisheriges Design Pro 4000 aktuelles Design</p> <p>Artikelnummer 04000-800</p> </div>	<div style="text-align: center;">  <p>Artikelnummer 06000-800</p> </div>

PRO Series

Anleitung zur korrekten Anbringung der Sondenhüllen

